

【添付文書】

動物用医療機器 一般医療機器 保定用器具

販売名「谷浦式 CT ポジショナー」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	ペットコミュニケーションズ株式会社
住所	大阪府大阪市中央区瓦町1丁目6番10号
保守サービス連絡先	ペットコミュニケーションズ株式会社 541-0048 大阪市中央区瓦町1丁目6番10号 電話 06-6228-0873 FAX 06-6228-0872
製造業者	ペットコミュニケーションズ株式会社

【警告】

適用対象（患者 猫及び小型～中型犬）

1. 患者の安全を確保するため、気道確保を行い、患者状況をモニタリングすること
2. 患者への機器装着時には、興奮状態にさせず、強く縛り付けしないこと

【禁忌・禁止】

適用対象（患者 猫及び小型～中型犬）



無麻酔時の大型犬など、体幹部高さが患者の背骨を超えるもの（圧迫あるいは、脱落の可能性あり）

【形状および寸法】

本製品は下記部品により構成される。

本品の構成部品は修理又は補充のため単体で販売する場合があります。

製品組み立て後 高さ 240mm 幅 370mm 長さ 1000mm

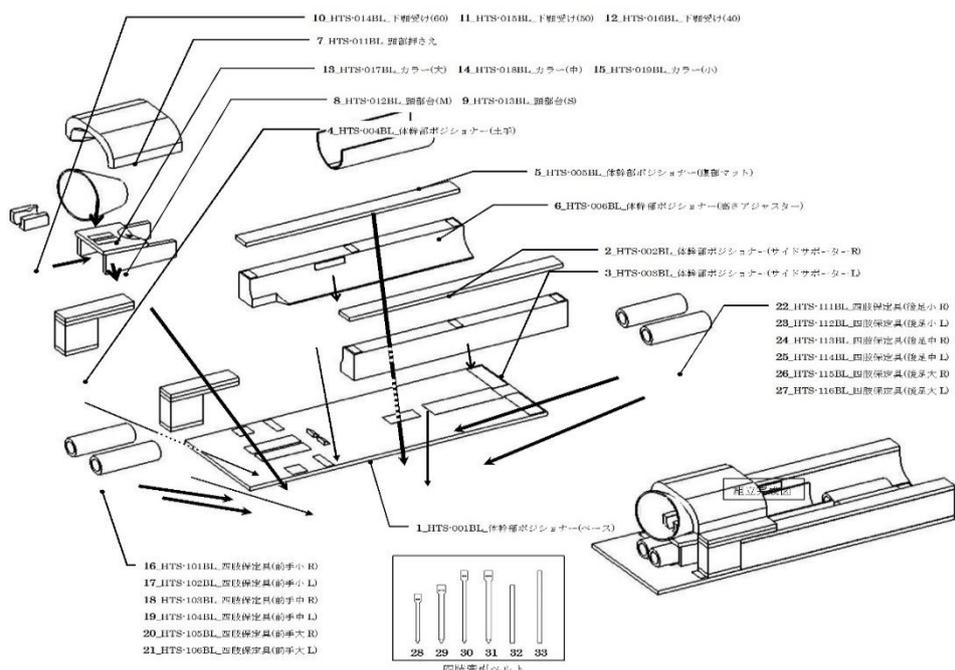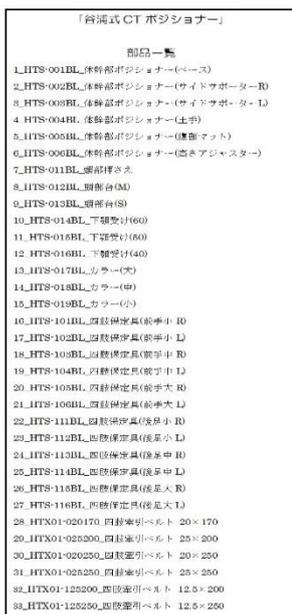

【性能又は効果】

CT撮影時に犬（小型犬、中型犬）又は猫の保定に用いる。

【使用方法等】

◆使用準備

- ① 動物の四肢に「四肢牽引ベルト」を巻き付ける
- ② 「四肢牽引ベルト」を誘引しながら「四肢保定具」に動物の四肢を挿入する
- ③ 「体幹部ポジショナー」を動物の大きさに合わせ組み立てる
- ④ 動物を「体幹部ポジショナー」に「四肢保定具」と連結し固定する。
- ⑤ 必要に応じ「頭部押さえ」「頭部台」「下顎受け」「カラー」を使用し動物を固定する
- ⑥ CT保定ベルトを牽引し、動物全体を固定する。
- ⑦ CT撮影を行う。

◆使用后

- ① 装着と逆の順序にて、各部品を動物より脱着する
- ② 各部品の汚れ、破損が無いか確認する

◆組合せて使用する医療機器

本製品が想定している医療機器は CT装置となります。

以外の医療機器でもポジショニングとしての利用は可能ですが検査データへの影響については確認できておりませんので、事前にモニタリングを実施の上、ご使用ください。

【使用上の注意】

◆使用上の注意の詳細については、本製品の使用方法説明書及びCT装置等医療機器の「添付文章」又は「取扱説明書」を参照すること。

◆使用注意

各部品については、エコマジック等で連結することが可能となっておりますが、患畜の体毛などの付着、その他汚物汚れなどでの品質劣化により、連結が弱くなる場合があります。清掃しても連結が弱くなりますと、患畜の保定が困難になる場合がありますので、新たな部品の購入等、適切な処置をしてください。各部品について、患畜等が噛みつくなどにより、破損した場合は、新たな部品の購入等、適切な処置をしてください。

【保管方法及び有効期間等】

◆保管方法

1. 保管、運搬等は、通常使用される環境の常温・常湿の範囲内で適切に行うこと
2. 使用後は、患畜の体毛、その他汚物汚れなどは中性洗剤等で清掃し清潔を保つこと

◆耐用期間

設置後5年以内【自己認証（当社試作及び材料耐用の経験による）】

ただし、患畜の体毛などの付着、その他汚物汚れなどでの品質劣化及び患畜等が噛みつくなどにより、破損する場合は除く。